



# Starten Sie MEMOplanner

Einleitung

Art. nr: 4628XX

Softwareversion 4.2 oder höher

# Glückwunsch zum neuen MEMOplanner!

Diese Anleitung hilft Schritt für Schritt bei der ersten Inbetriebnahme Ihres MEMOplanner-Geräts.

Lesen Sie auch die anderen mitgelieferten Handbücher, die bei Folgendem weiterhelfen können:

- *Gebrauchsanweisung*: Produktübersicht, Stromversorgung, Konto und Lizenz, wie man das Gerät verwaltet, die Kamera benutzt usw.
- *Referenzhandbuch*: Detaillierte Informationen zur Funktionsweise des Kalenders, zum Hinzufügen von Aktivitäten, zum Starten eines Timers und zum Anpassen von MEMOplanner für den Benutzer.
- *Kurzanleitung*: Kurze Anleitung zum Hinzufügen einer Aktivität oder zum Starten eines Timers.

## 1 Anschließen des Netzadapters

Schließen Sie den Netzadapter zwischen MEMOplanner und einer Steckdose an.

Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung finden Sie in der *Gebrauchsanweisung*.

## 2 Starten MEMOplanner


Halten Sie die *Ein-/Aus*-Taste gedrückt, um zu starten.

Weitere Informationen zum Starten des Geräts finden Sie in der *Gebrauchsanweisung*.


## 3 Befolgen der Anweisungen im Konfigurationsassistenten

Der Konfigurationsassistent hilft Ihnen, den MEMOplanner einzurichten:

### Herstellen der Internetverbindung

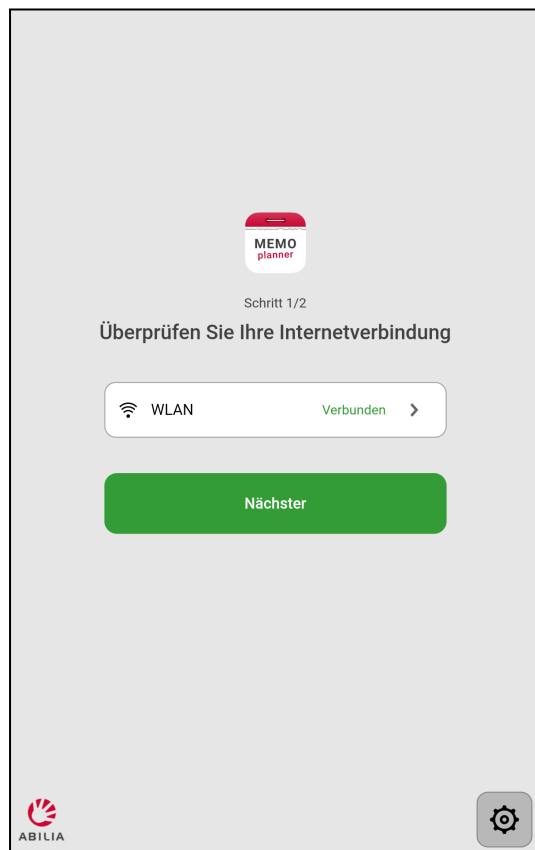

### Auswahl der Stimme für die Sprachausgabe

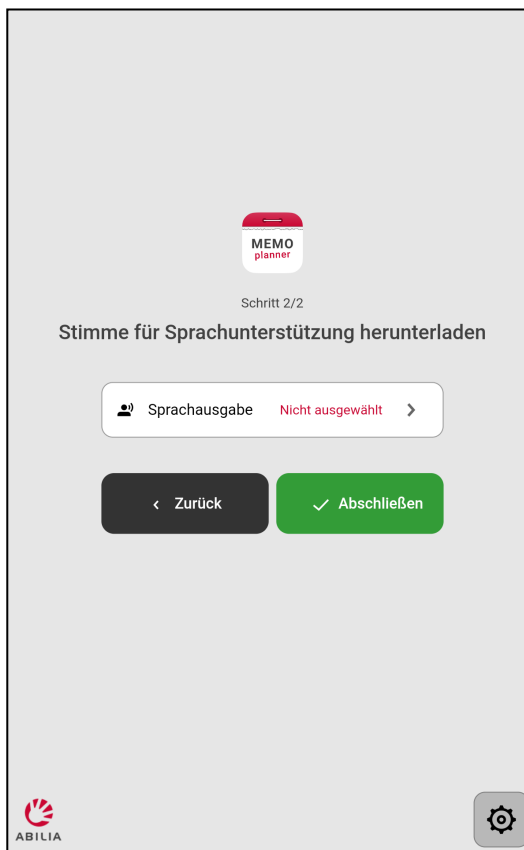

## 4 Anmelden mit dem myAbilia-Konto

Um MEMOplanner nutzen zu können, benötigen Sie ein myAbilia-Konto.

Wenn Sie über ein myAbilia-Konto verfügen, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf **Anmelden**.

Wenn Sie ein myAbilia-Konto erstellen möchten, tippen Sie auf **Benutzerkonto erstellen** und folgen den Anweisungen.

Beachten Sie beim Erstellen eines neuen Kontos Folgendes:

- Wenn Sie Ihre *E-Mail-Adresse* als Benutzernamen eingeben, können Sie leicht Ihr Passwort ändern, wenn Sie es vergessen.
- Wenn Sie Ihre *Telefonnummer* als Benutzernamen eingeben, können wir bei Abilia Ihnen beim Ändern Ihres Passwortes helfen, wenn Sie es vergessen.

Weitere Informationen zum myAbilia-Konto und zur MEMOplanner-Lizenz finden Sie in der *Gebrauchsanweisung*.

## 5 Merken und aufbewahren Ihrer Kontoinformationen

Bitte notieren Sie sich zur Erinnerung hier Ihre Kontoinformationen.

Meine Kontoinformationen für MEMOplanner und den Webservice myAbilia:

Benutzername: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Passwort: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**i** *HINWEIS: Bewahren Sie die Anmeldeinformationen an einem sicheren Ort auf.*

## 6 Hinzufügen eines Einstiegspakets

Wenn das myAbilia-Konto ganz neu ist, haben Sie die Möglichkeit, ein Einstiegspaket mit Bildarchiv, Standardaktivitäten, Standardtimern und Checklisten hinzuzufügen.



## 7 Jetzt ist MEMOplanner einsatzbereit!

Informationen zum Hinzufügen von Aktivitäten und zum Verwalten des Kalenders finden Sie im mitgelieferten *Referenzhandbuch* und in der *Kurzanleitung*.



- ① **HINWEIS:** Nach der Anmeldung kann das MEMOplanner-Gerät ohne Internetverbindung genutzt werden.

## 8 myAbilia-Webservice, Remote-Unterstützung erhalten

Öffnen Sie einen Webbrowser auf dem Computer, Smartphone oder Tablet.

Gehen Sie zu [myabilia.com](http://myabilia.com) ein und melden Sie sich mit Ihrem myAbilia-Konto an.

Hier können Sie Hilfspersonen einladen, die Sie aus der Ferne unterstützen können. Ein bei myAbilia angemeldeter Hilfsperson kann Ihnen beim Hinzufügen von Aktivitäten und Bildern, beim Erstellen von Checklisten usw. helfen. Solange Ihr MEMOplanner-Gerät mit dem Internet verbunden ist, werden in myAbilia vorgenommene Änderungen auf Ihrem Gerät angezeigt.

- ① **HINWEIS:** Um den myAbilia-Webdienst nutzen zu können, ist eine gültige MEMOplanner-Lizenz erforderlich.

## 9 MEMOplanner Go-App, Unterstützung auf Ihrem Handy

Laden Sie die MEMOplanner Go-App kostenlos aus dem App Store oder von Google Play herunter.

Melden Sie sich mit demselben Benutzernamen und Passwort wie für MEMOplanner an.



- ① **HINWEIS:** Wenn Aktivitäten über die MEMOplanner Go-App hinzugefügt oder geändert werden, muss das MEMOplanner-Gerät mit dem Internet verbunden sein, damit diese Änderungen angezeigt werden.

## Wir helfen Ihnen!

E-Mail: [support@abilia.se](mailto:support@abilia.se)

Telefon: +46 (0)8 594 694 00

Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr

Für weitere Informationen zum MEMOplanner und dem Zubehör scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu [www.abilia.com](http://www.abilia.com) - MEMOplanner.



Scan mich!  
Medium



Scan mich!  
Large